



BRUGSVEJLEDNINGER:

1. Før du åbner og rører masken, vasker dine hænder grundigt med sæbe og vand eller alkohol/baseret hånd desinfektionsmidler (> 60% alkoholindhold).
2. Åbn masken med begge hænder til siderne.
3. Anbring masken på dit ansigt, der dækker mund og næse.
4. Stropperne bør ikke være mellem masken og dit ansigt.
5. Justér næsebroget, indtil den passer til din næse-bro.
6. Dæk masken med begge hænder, indtil masken passer godt rundt om ansigtet.

FORHOLDSREGLER:

1. Dette produkt er ikke egnet til beskyttelse mod skadelige gasser, dampe eller olieagtige aerosoler.
2. Produktet genererer ikke ilt og er ikke egnet til brug i anoxiske omgivelser, under vand, under evakuering eller til brandbekæmpelse.
3. Det anbefales ikke at bruge dette mundbind, hvis kanten af mundbindet ikke sidder ordentligt mod ansigtet under brug.
4. Hvis det konstateres under brug, at masken er beskadiget eller vejtrækningsmodstanden er for stor, erstattes med en ny.
5. Dette produkt er engangsbrug, masker må ikke genbruges. Anbefalet brugstid er 4-8 timer.
6. Denne filtreringshalvmasker er kun fremstillet til COVID-beskyttelse. Denne filtrering af halvmasker er ikke en PV-anordning til almindelig brug og må ikke anvendes til andre formål end beskyttelse mod COVID-19.
7. Dette produkt må ikke bruges i mere end et skift.



Techdentika Company, Tilzes st. 86, Siauliai, Litauen
Det CE-bemyndigede organ: INVESTIGACION DE INDUSTRIA TEXTIL AITEX,
Plaza Emilio Sala 1, Spanien





www.dmcmask.com

FFP2

BESKYTTENDE
ÅNEDRAG
DM-002

LAVET I
EUROPA



CE 0161

EN149:2001+A1:2009
COVID-19 PPE-R/02.75-V2

SORT

2 stk.



Ekstra komfort
Ikke-vævede stof
hudvenlig



Let åndedrag
Lav åndedrætsbesvær
Ubehagelighed



Perfekt dækning
Passer til ansigt
bedre

Particle Filtration Effektivitet > 95%



4 779050

340423

